

2. Indicaciones

- Primer de dientes artificiales de resina y carillas (Veneers) de PMMA
- Primer y de dientes artificiales de resina y carillas (Veneers) de composite
- Primer/ creación de la capa de inhibición de composites polimerizados (Diacrilatos)
- Primer para estructuras, base acrílica, así como materiales para coronas y puentes a base de PMMA y composites y polímeros de alto rendimiento termoplásticos como BioHPP.
- Reparaciones de coronas y puentes de resina o composite.

3. Contraindicaciones

visio.link esta concebido para acondicionar estructuras de metal o cerámica o de óxido de circonio.

4. Consejos de peligrosidad y seguridad

Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro:

H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H315	Provoca irritación cutánea
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

Prevención:

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P261 Evitar respirar los vapores.

P280 Llevar guantes/gafas de protección.

Respuesta:

P302+P350 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resul fácil. Seguir aclarando.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/reginal/nacional/internacional.

Product contains: metacrilato de metilo; 2-propenoic acid reaction products with pentaerythritol; difenil (2,4,6-trimetilbenzoi)lo-fosfina óxido

5. Consejos de almacenamiento y durabilidad

visio.link se deberá almacenar adecuadamente entre 4 hasta 25° C y tiene una durabilidad de 3 años. visio.link proteger del calor y rayos del luz. Una vez se haya pasado la fecha de caducidad no utilizarlo.

6. Modo de empleo

6.1 Acondicionamiento

Arenar las carillas, dientes y el material con óxido de aluminio de 110 µ a 2 - 3 bares (dar rugosidad , aumento de superficie). Si se utilizase en boca utilizar dique de contención. A continuación por medio de un pincel humedecer la superficie a acondicionar con visio.link, realizando seguidamente el endurecimiento / fotopolimerización en la maquina de fotopolimerización según se describe en el punto 6.2. Como alternativa al arenado se podrá utilizar una fresa para dar rugosidad a la superficie. No vaporizar, si hubiese impurezas limpiar con alcohol y pincel limpio.

Consejo: pincelar una fina capa de visio.link. Aplicar solo una vez una capa de visio.link! Fotopolimerizar una vez se haya aplicado el visio.link.

6.2 Equipo fotopolimerizable y tiempo de polimerización

En los equipos de fotopolimerización existen diferentes fuentes de luz (laboratorio & clínica). Se necesita equipos de luz que cubra el campo de ondas de 370 a 400 nm (como por ejemplo, 90 seg. con el bre.Lux Power Unit o DentacolorXS o UniXS de Heraeus Kulzer, 4 min Polylux). Lámparas de fotopolimerización LED, que no emiten luz UV-A no están indicadas.

Consejos: Una polimerización completa solo se podrá garantizar cuando la superficie después de haber sido polimeizado esta seca.


7. Otros consejos

El producto solo podrá ser utilizado por odontólogos y protésicos y el personal facultativo con conocimiento. Para su manipulación se deberán de utilizar el instrumental y piezas originales


Todos los números de lote de las piezas utilizadas se deberán documentar para poder garantizar su trazabilidad y poder así tener derecho a realizar una reclamación.


La información sobre el producto se acoge a los últimos resultados y experiencias sobre el mismo. El producto solo se podrá utilizar como se describe en el punto2. y sus indicaciones. Por ello aconsejamos antes de su uso leer de nuevo la información sobre el producto. Todos los consejos con respecto a su manipulación se basan en nuestra propia experiencia y solo se podrá ver como información orientativa.


Symbole / Symbols / Symboles / Simboli / Símbolos:


 Symbol für „Europäische Konformität“
European conformity marking
Symbole de Conformité Européenne
Simbolo per la „Conformità Europea“
Símbolo de «conformidad europea»


 Hersteller
Manufacturer
Fabricant
Fabbricante
Fabricante


 Artikelnummer
Catalogue number
N° du produit
Codice d'ordine
Referencia de artículo


 Medizinprodukt
Medical device
Produit médical
Dispositivo medico
producto sanitario

 Fertigungsnummer, Charge
Batch code
Code du lot
Numero di lotto
Código de lote

 Verwendbar bis
Use-by date
Utilisable jusqu'au
Utilizzabile entro
Puede usarse hasta


 Vor Sonnenlicht schützen
Keep away from sunlight
Protéger contre la lumière du soleil
Proteggere dai raggi solari
Mantener alejado de los rayos del sol


 Temperaturbegrenzung
Temperature limit
Limites de température
Limiti di temperatura
Límites de temperatura

 Produktidentifikationsnummer
Unique device identifier
Numéro d'identification du produit
Numero di identificazione del prodotto
Número de identificación del producto

Symbole nach GHS-Verordnung/Symbols according to GHS regulation/Symboles selon le règlement GHS/ Simboli in base alla normativa GHS/Símbolos según las normas GHS

 GHS02, Flamme
GHS02, Flame
GHS02, flamme
GHS02, fiamma
GHS02, llama

 GHS05, Ätzwirkung
GHS05, Corrosive effect
GHS05, corrosion
GHS05, Corrosivo
GHS05, Corrosividad

 GHS07, Ausrufezeichen
GHS07, exclamation mark
GHS07, point d'exclamation
GHS07, punto esclamativo
GHS07, signo de exclamación

Symbol nach NFPA (USA)/Symbols according to NFPA (USA)/Symboles selon NFPA (USA)/Simboli in base a NFPA (USA) / Símbolos según NFPA (USA)

 HEALTH 1
FIRE 1
REACTIVITY 0

Gefahrendiamant
Hazard diamond
Losange de danger
Diamante di fuoco
diamante peligroso

